

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KIM CHỌC DÒ TỦY SỐNG NIPRO SPINAL NEEDLE

Mô tả Sản phẩm

Kim chọc dò tủy sống Nipro sản xuất theo công nghệ thép Nhật Bản để thâm nhập vào những vị trí khó, vật liệu SUS 304 và chất dính UV, **đầu kim bén giảm nguy cơ tụ máu dưới màng cứng và thành kim mỏng cho dòng chảy tốt**. Polypropylene hub trong suốt để quan sát dịch não tủy. Tiệt trùng ETO Mã code theo màu sắc để chọn lựa kích cỡ kim Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE

Chỉ định sử dụng

Gây tê tủy sống: tiêm thuốc tê vào khoang dưới nhện khi tiến hành chuẩn đoán, phẫu thuật hoặc giảm đau
Chọc dò tủy sống: hút dịch não tủy để chuẩn đoán, xét nghiệm

Chống chỉ định

Tuân thủ các chống chỉ định đối với thủ thuật gây tê và chọc dò tủy sống. Không sử dụng trên bệnh nhân:
Giảm thể tích tuần hoàn mất bù nghiêm trọng
Sốc, mắc bệnh cột sống hoặc não cấp tính
Tăng áp lực nội sọ
Vị trí tiêm đang bị nhiễm trùng
Rối loạn đông máu
Biến dạng đốt sống lưng

Cảnh báo và thận trọng

Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng
Chỉ được thao tác bởi nhân viên đã qua đào tạo để kiểm soát biến chứng

Chỉ sử dụng khi bao bì còn nguyên vẹn

Sau khi chọc dò bệnh nhân có thể:

Đau đầu, hạ huyết áp, chậm nhịp tim, hạ thân nhiệt, nôn mửa, tê toàn bộ cột sống, hội chứng áp suất dịch não tủy thấp, ngừng thở hoặc nhiễm độc cấp tính do thuốc gây tê tại chỗ

Hội chứng máu tụ ngoài màng cứng, áp-xe, hội chứng chùm đuôi ngựa rất hiếm nhưng vẫn có ghi nhận

Cách dùng

TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT ĐIỀU KIỆN VÔ TRÙNG

1. Tư thế bệnh nhân phù hợp: nằm ngang hoặc ngồi

2. Chọn kích cỡ kim phù hợp, chuẩn bị dụng cụ, khử trùng vùng chọc
3. Tiêm thuốc tê tại vị trí chọc
4. Sử dụng kim dẫn đường vào vào vị trí chọc cho đến khi chạm tới khe liên gai (Kim chỉ đường được cố định bằng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái- đối với người thuận tay phải)
5. Đẩy kim gây tê bao gồm cả cây thông nòng tới thông qua kim dẫn đường. Khi kim đã xuyên qua dây chằng vàng và khoang dưới nhện sẽ nghe tiếng “click” báo hiệu
6. Rút bỏ cây thông nòng: dịch não tủy chảy ra có thể lẫn 1 ít máu. Đối với thủ thuật chọc dò tủy sống: lấy dịch não tủy đi chuẩn đoán, dán vô trùng vị trí chọc dò. Đối với thủ thuật gây tê cột sống: quan sát dịch não tủy chảy ra để đảm bảo chọc kim đúng chỗ, tiến hành tiêm thuốc tê
7. Dán vô trùng vị trí chọc dò sau khi tiêm thuốc
8. Xoay bệnh nhân để thuốc tê lan tỏa
9. Theo dõi thận trọng tác dụng của thuốc tê. Bắt đầu tiến hành phẫu thuật sau khi đạt mức tê mong muốn

Bảo quản / Sử dụng

Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh nơi nhiệt độ và độ ẩm cao
Hạn sử dụng: xem trên bao bì

Nhà sản xuất

NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTD,
2-19-64 Matsubara, Tatebayashi-shi, Gunma, 374-8518,
Nhật Bản