

QUẢ LỌC CF-609N

QUẢ LỌC DỊCH VÀ NƯỚC SIÊU SẠCH

Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng CF-609N

Cách sử dụng

1. Cách kết nối


Để kết nối CF-609N, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau.

- (1) Kết nối coupler vào cổng cấp nước và cổng dịch đầu ra
 - (2) Tháo nắp khỏi cổng xả.
 - (3) Sau khi kẹp chặt đầu dịch ra, mỗi bộ lọc bằng dịch lọc hoặc nước từ cổng cấp nước vào đến cổng xả để đẩy khí ra khỏi vỏ quả lọc.
 - (4) Sau khi xác nhận đã đuổi hết khí, dừng dòng dịch lọc hoặc nước và gắn nắp và móc cài. Đảm bảo không để không khí lọt vào vỏ quả lọc. Nếu không khí lọt vào vỏ quả lọc, phải đuổi khí ra theo hướng dẫn mục “Xả” bên dưới
 - (5) Tháo kẹp cổng dịch ra và đưa dịch lọc hoặc nước vào. Tiếp tục dòng dịch lọc hoặc nước trong hơn 10 phút với tốc độ 500 ml / phút để làm sạch quả lọc.
- * CF-609N được chỉ định để sử dụng với phương pháp lọc áp suất bên ngoài ”(phương pháp trong đó quá trình lọc được thực hiện từ bên ngoài của sợi lọc đến bên trong). Không sử dụng với phương pháp lọc áp suất chân không.

2. Xả

Để xả nước, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau.

- (1) Ngừng cung cấp dịch lọc hoặc nước.
- (2) Kẹp cổng dịch ra và tháo chốt và nắp gắn vào cổng xả.
- (3) Tiếp tục chạy dịch lọc hoặc nước qua thiết bị trong vài phút với tốc độ 500ml /phút hoặc cao hơn.
- (4) Ngừng cung cấp dịch lọc hoặc nước. Gắn móc cài và nắp vào cổng xả. Đảm bảo không để không khí lọt vào vỏ bộ lọc.
- (5) Tháo kẹp cổng dịch ra, cho nước/ dịch lọc đi qua. Nếu có sử dụng chất khử khuẩn trong quá trình xả, rửa và xả cẩn thận để không tồn dư hóa chất trong quả.

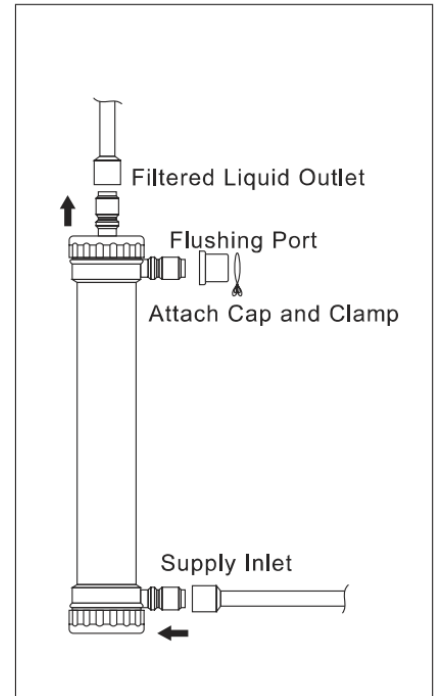

Thận trọng

1. Thận trọng khi Lưu trữ

Bảo quản ở 0-35 ° C, tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, rung động mạnh và độ ẩm cao. Không mở gói cho đến khi sẵn sàng sử dụng. Không tuân theo cảnh báo này có thể dẫn đến nhiễm chéo. Hãy cẩn thận để tránh làm rơi

2. Thận trọng khi sử dụng

Hạn sử dụng ghi trên nhãn và bao bì là ngày mà CF-609 N phải được sử dụng, khác với thời hạn sử dụng sau khi đã cài đặt vào máy.

Không sử dụng nếu bao bì bị rách hoặc hư hại.

CF-609N được thiết kế để sử dụng với phương pháp lọc áp suất bên ngoài. Không sử dụng với phương pháp lọc áp suất chân không.

CF-609N là quả siêu lọc được thiết kế lọc nước và dịch lọc đã có theo tiêu chuẩn nhất định. Vì vậy, nếu cho nước máy thông thường đi qua sẽ làm giảm nhanh tính thẩm của quả lọc, trong trường hợp này cần sử dụng thêm một tiền lọc trước khi cho nước vào quả lọc để tránh làm giảm hiệu suất của quả.

Nếu không khí lọt vào vỏ bộ lọc trong khi sử dụng, hãy xả khí ra khỏi cổng xả.

Bằng cách lắp đặt CF-609 N vào hệ thống, tốc độ dòng chảy hoặc áp suất sẽ được giảm ở cuối hệ thống.

Kiểm tra từng bộ phận sau khi cài đặt và xác nhận hoạt động trơn tru.

Việc giảm áp suất có thể tăng lên do sử dụng quá lâu, kiểm tra hiệu suất quả thường xuyên để phát hiện bất thường.

Để tránh nhiễm chéo, đảm bảo rằng CF-609N đã được vệ sinh sạch sẽ sau khi lắp đặt.

Mục đích sử dụng

C F-609 N là phù hợp để làm sạch nước và nước bằng cách loại bỏ nội độc tố (xác vi khuẩn), vi khuẩn và các phần tử.

Chống chỉ định

Không có chống chỉ định đặc biệt nào khi sử dụng CF-609N để lọc dịch lọc và nước.

Đảm bảo:

- CF-609N được sản xuất dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và chất lượng được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu CF-609 N bị lỗi (do bao bì hư hại, hoặc hư hại sản phẩm), chúng tôi sẽ thay thế nó bằng một cái mới với chi phí của chúng tôi khi trả lại gói bị hỏng hoặc sản phẩm đã được kiểm tra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc gây thương tích cho bệnh nhân hoặc người hoặc thiệt hại cho bất kỳ đồ vật nào được cho là do vận chuyển, lưu trữ và lỗi kỹ thuật vận hành trong cơ sở của bạn.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thương tích hoặc thiệt hại nếu bệnh nhân hoặc bất kỳ người nào bị thương hoặc bất kỳ đồ vật nào bị hư hỏng khi sử dụng CF-609N, trừ khi chúng tôi được xác định rõ ràng là có lỗi.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào do sử dụng CF-609N sau ngày hết hạn ghi trên nhãn hoặc bao bì.

Thông số kỹ thuật & Hiệu suất

Sợi rỗng	Vật liệu	Polyethersulfone
	Diện tích màng	0.6 m2
	I.D.	500 um
	Độ dày	150 um
Vỏ		Polycarbonate
Keo kết dính		Polyurethane
O-ring		Cao su silicone
Áp suất hoạt động tối đa		1.5 kgf/cm*
Mất áp suất (37 °C)	0.07 kgf/cm*at 500ml/min	
	0.14 kgf/cm*at 1000ml/min	
Điểm cắt (MW)		6000 (Protein)
Tiệt trùng		Tia gamma



NIPRO CORPORATION
3-26, Senriokashinmachi, Settsu,
Osaka, 566-8510, Japan
NIPRO MEDICAL EUROPE
Blokhuisstraat 42,
2800 Mechelen, BELGIUM

[Authorized Representative in Malaysia]
NIPRO MALAYSIA SDN BHD
B-3-2, The Ascent Paradigm, No.1 Jalan SS7/26A,
Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor,
MALAYSIA - GB554236516
[Sponsor in Australia]
NIPRO AUSTRALIA PTY LTD
Suite 2.02, Level 2, 657 Pacific Highway,
St Leonards, NSW 2065, AUSTRALIA

[Distributed By]
PT. Sinar Roda Utama
Duta Merlin Blok C No.58 Jl.
Gajah Mada No.3-5
Jakarta - Indonesia
KEMENKES RI AKL 20805320682

STERILE R