

<Hướng dẫn sử dụng> Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chống chỉ định

- Không được tái sử dụng.

Chỉ định


Bao phủ và bảo vệ vị trí vết thương do kim đâm.

Hướng dẫn sử dụng


(Cách dán)

- (1) Tháo bao bì theo chiều mũi tên. (xem Hình 1 bên dưới)
- (2) Giữ phần giấy bảo vệ gấp và sản phẩm này, sau đó bóc ra khỏi lớp giấy nền. Thẻ tab giúp hỗ trợ thao tác này. Sau đó, tiếp tục bóc phần giấy bảo vệ gấp. (Xem Hình 2 và Hình 3 bên dưới.)
- (3) Trước khi tháo kim, dán sản phẩm nhẹ nhàng lên vị trí đâm kim. (xem Hình 4 bên dưới)
- (4) Tháo kim và bao phủ vị trí đâm kim. (xem Hình 5 bên dưới)
- (5) Ấn nhẹ xung quanh miếng dán để đảm bảo miếng dán đã dính cố định. (xem Hình 6 bên dưới).

Hình 1

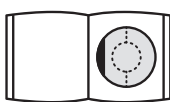

Hình 2

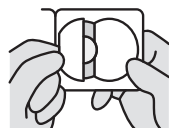


Hình 3



Hình 4



Hình 5

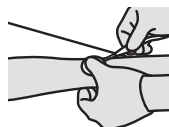


Hình 6



(Cách tháo gỡ)

- (1) Kiểm tra vị trí dán trước khi tháo gỡ. (xem Hình 7 bên dưới)
- (2) Để tháo ra, cầm miếng dán và từ từ tháo ra. (xem Hình 8 bên dưới)

Hình 7

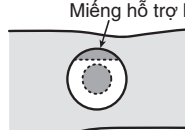

Hình 8



Cảnh báo

- (1) Làm sạch vị trí kim đâm và xung quanh, đồng thời lau khô trước khi sử dụng. Có thể khó dán nếu vị trí dán bị ẩm. Đặc biệt, các loại thuốc sát trùng, thuốc dạng lỏng... cần được lau khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- (2) Nếu các triệu chứng như nhiễm trùng hoặc rối loạn da xuất hiện khi sử dụng sản phẩm, ngưng sử dụng và tiến hành điều trị y tế thích hợp.
- (3) Không dán bề mặt dính lên vùng da bị ảnh hưởng.

(4) Nếu các triệu chứng như phát ban, đỏ hoặc ngứa xuất hiện sau khi sử dụng sản phẩm, ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

(5) Thận trọng khi sử dụng nếu bạn dễ bị phát ban do băng dính sơ cứu.

(6) Mở bao bì miếng dán ngay trước khi sử dụng để không làm giảm tính vô trùng của sản phẩm.

(7) Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng hoặc bị nhiễm bẩn, vì tính vô trùng của sản phẩm có thể bị mất.

(8) Khi gỡ bỏ, vừa bóc vừa giữ da để tránh làm tổn thương da. Nếu khó gỡ bỏ hoặc nếu vẫn còn vết dính, sử dụng chất tẩy dính y tế.

(9) Để tránh kích ứng da nhiều nhất có thể, hãy loại bỏ sản phẩm này sau khoảng 3 giờ.

(10) Dùng sản phẩm này che phủ thích hợp vị trí đâm kim.

Ký hiệu trên nhãn

	Không được tái sử dụng
	Tiệt trùng bằng ethylene oxide
	Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng
	Bảo quản tránh ánh sáng
	Bảo quản nơi khô ráo
	Thao tác cẩn thận
	Không sử dụng kẹp
	Đặt hướng lên trên