

ỐNG HÚT ĐÀM **SUCTION CATHETER**

CONFIDENTIAL

<Hướng dẫn sử dụng>

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng

Không được tái sử dụng


[Chống chỉ định • Nghiêm cấm]

- 1) Sản phẩm sử dụng một lần, không được tái sử dụng.


[Hình dạng/cấu tạo và nguyên lý]

1. Hình dạng/ cấu tạo

1) Loại van điều chỉnh

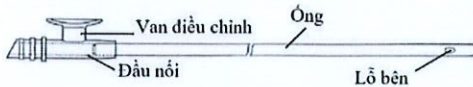

2) Loại đầu nối

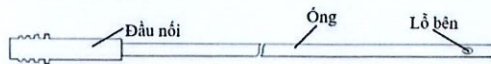

2. Vật Liệu

Ống	PVC
Đầu nối	ABS hoặc PVC

Chất hóa dẻo được sử dụng cho PVC là DEHP

[Mục đích sử dụng/tác dụng]

Sản phẩm này được đưa vào mũi hoặc miệng vào hầu, thanh quản, khí quản hoặc phế quản thông qua ống nội khí quản hoặc ống mở khí quản và được sử dụng để hút, dẫn lưu và loại bỏ dị vật, vv...

[Hướng dẫn sử dụng]

1. Điều chỉnh áp lực hút của máy hút.
2. Nối chặt đầu nối với máy hút bằng ống nối.
3. Trong trường hợp sử dụng loại van điều chỉnh, điều chỉnh áp lực hút bằng cách dùng ngón tay chặn lỗ điều chỉnh. Đối với loại đầu nối, gấp cong ống thông ở điểm nối giữa ống thông và đầu nối để điều chỉnh.
4. Tiến hành đưa đầu ống thông dọc theo khoang mũi đến hầu, không dùng áp lực hút theo phương pháp ở bước 3. Trường hợp hút từ miệng, cần mở miệng vừa đủ và đưa lưỡi về phía trước. Trường hợp đang sử dụng ống nội khí quản, đưa ống thông luôn qua ống nội khí quản.
5. Sau khi đưa ống thông vào vị trí mong muốn, ấn van hút để hút dịch, vừa xoay đầu ống vừa hút ra.
6. Sau khi sử dụng, cần lưu ý ngăn ngừa nhiễm trùng và thải bỏ ống thông bằng phương pháp an toàn.

<Lưu ý khi sử dụng liên quan đến phương pháp sử dụng>

1. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo rằng độ dày và chiều dài của ống thông phù hợp với vị trí đưa vào.
2. Khi sử dụng kết hợp với các thiết bị y tế khác, cần đảm bảo rằng các thiết bị được kết nối hoặc gắn chắc chắn với nhau.
3. Chú ý không để dịch thuốc, vv... dính vào phần kết nối. [Có thể dẫn đến nguy cơ làm lỏng khớp nối]
4. Khi đưa ống thông vào, cần cẩn thận để không làm tổn thương niêm mạc tại vị trí đặt ống thông như khoang miệng hoặc khoang mũi.
5. Trường hợp có cản trở khi đưa ống thông vào, cần rút ống thông ra, sau khi xử lý nguyên nhân thì đưa ống thông vào lại. [Có thể dẫn đến nguy cơ tổn thương niêm mạc.]
6. Khi đưa ống thông vào, cần chú ý không đưa quá sâu vào vị trí cần đặt ống. [Có thể dẫn đến nguy cơ khó rút ống thông, hoặc gây tổn thương niêm mạc.]
7. Khi rút ống thông, cần kéo ống ra từ từ. [Có thể gây tổn thương niêm mạc.]

[Lưu ý khi sử dụng]

1. Lưu ý cơ bản quan trọng

- 1) Với các loại thuốc tan trong chất béo, cần thận trọng vì có nguy cơ di-2-ethyl-hexyl phthalate (DEHP), một chất chống dẻo của polyvinyl clorua (PVC), bị rò rỉ ra ngoài.
- 2) Trong quá trình sử dụng, cần lưu ý không làm hỏng sản phẩm, làm lỏng khớp nối, rò rỉ, tắc nghẽn, vv...
- 3) Cần thận trọng không kéo, đẩy hoặc uốn cong phần nối giữa ống thông và đầu nối quá mức. [Ống thông có nguy cơ bị đứt, hư hỏng, giãn, vv...]
- 4) Khi đưa ống thông vào, cần lưu ý không để răng hoặc dụng cụ sắc nhọn làm xước ống. [Có nguy cơ gây rò rỉ hoặc hư hỏng sản phẩm.]
- 5) Không vận quá chặt đầu nối khi kết nối với thiết bị y tế khác. [Có nguy cơ không tháo được đầu nối, hoặc đầu nối bị hỏng gây rò rỉ từ phần kết nối.]
- 6) Lưu ý ống có thể bị xoắn hoặc tắc nghẽn do chuyển động của cơ thể.

2. Sự cố/tác dụng phụ

1) Các sự cố khác

- (1) Hư hỏng ống thông
- (2) Hư hỏng đầu nối
- (3) Rò rỉ từ phần kết nối

2) Các tác dụng phụ khác

- (1) Tổn thương/chảy máu niêm mạc khoang mũi, khoang miệng, hầu họng và phế quản

[Phương pháp bảo quản và thời hạn sử dụng]

1. Phương pháp bảo quản

Bảo quản tại nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và những nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao.

2. Hạn sử dụng

Xem hạn sử dụng trên bao bì.

Các ký hiệu được sử dụng để dán nhãn

STERILE EO

Tiệt khuẩn bằng etylen oxyt



Không được sử dụng khi bao gói đã bị hư hỏng



Không sử dụng lại



Tránh xa ánh nắng mặt trời



Giữ khô ráo

[Nhà sản xuất]

CÔNG TY TNHH NIPRO VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô I-8-3, Đường D8, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

[Nhà phân phối]

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MADE IN VIETNAM