



KIM CÁNH BƯỚM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG KÈM HOLDER

SAFETOUCH™ PSV SET

(Không chứa DEHP)

<Hướng dẫn sử dụng>

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng

Không được tái sử dụng

[Chống chỉ định/Nghiêm cấm]

- 1) Sản phẩm sử dụng một lần, không được tái sử dụng.
- 2) Việc lấy máu bằng sản phẩm này chỉ nên được thực hiện kết hợp với ống lấy máu chân không vô trùng và holder sử dụng một lần.
- 3) Sau khi lấy máu xong, không tháo ga-rô khi kim lấy máu vẫn còn gắn với ống lấy máu. [Sự thay đổi áp lực do tháo ga-rô, có nguy cơ làm cho máu bên trong ống lấy máu có thể chảy ngược vào cơ thể bệnh nhân.]
- 4) Thay holder cho mỗi lần sử dụng cho bệnh nhân, hủy bỏ ngay sau khi sử dụng xong. [Trường hợp máu dính lên holder có nguy cơ lây nhiễm chéo]

[Hình dạng/Cấu tạo và nguyên lý]

1. Hình dạng/Cấu tạo

Sản phẩm là kim lấy máu được dùng để lấy máu bằng hệ thống lấy máu chân không, được cấu tạo từ thân kim, phần bảo vệ cánh, dây và luer adapter, vv... Ngoài ra còn đi kèm với holder - giá đỡ ống nghiệm.

Ngoài ra, nhằm mục đích xử lý an toàn sau khi sử dụng, phần bảo vệ cánh được trang bị cơ chế ngăn ngừa tai nạn do kim tiềm (phòng tránh tai nạn do kim tiềm) để bảo vệ và bảo quản kim sau khi lấy máu.

Ống bọc cao su có khả năng chịu áp lực.



2. Chất liệu

Thân kim	Thép không gỉ
Đốc kim	Nhựa Acrylic
Dây	PVC
Đầu kết nối	ABS
Luer Adapter	PP, Thép không gỉ

Chất hóa dẻo được sử dụng cho PVC là TOTM

[Mục đích sử dụng/tác dụng]

Sản phẩm được dùng để tiêm tĩnh mạch và lấy mẫu máu bằng ống lấy máu chân không để xét nghiệm máu.


[Hướng dẫn sử dụng]

1. Phương pháp sử dụng


- 1) Vệ sinh và tháo nắp bảo vệ đã gắn vào Luer Adapter của sản phẩm, sau đó gắn Luer Adapter vào Holder. Đối với loại Kim cánh bướm lấy máu chân không kèm holder, kiểm tra để đảm bảo rằng holder đang được kết nối chắc chắn trước khi sử dụng.
- 2) Buộc ga-rô và sát trùng vị trí đâm kim.
- 3) Tháo nắp gắn kim bằng cách kéo thẳng ra, kẹp giữ phần cánh và đâm kim vào tĩnh mạch.
- 4) Sau khi đã đâm kim vào ống lấy máu, đẩy ống lấy máu thẳng vào holder.
- 5) Giữ nguyên trạng thái cho đến khi lấy được lượng máu quy định.
- 6) Sau khi máu ngừng chảy, nhẹ nhàng tháo ống khỏi holder.
- 7) Trường hợp lấy máu liên tục, thì giữ cố định holder và thay ống lấy máu mới.
- 8) Sau khi lấy máu xong, rút ống lấy máu khỏi holder rồi tháo ga-rô.
- 9) Sau khi lấy máu xong, cẩn thận tháo ống ra để cầm máu.
- 10) Sau khi sử dụng, hãy cẩn thận để tránh phơi nhiễm và hủy bỏ sản phẩm theo cách an toàn.

2. Hướng dẫn cách kích hoạt cơ chế đầu bảo vệ an toàn để phòng tránh tai nạn do kim

- 1) Sau khi sử dụng sản phẩm, giữ 2 bên nút kích hoạt đầu bảo vệ an toàn để mở khóa (1) và cho thân kim thu vào bên trong phần bảo vệ cánh (2) (Hình 1)

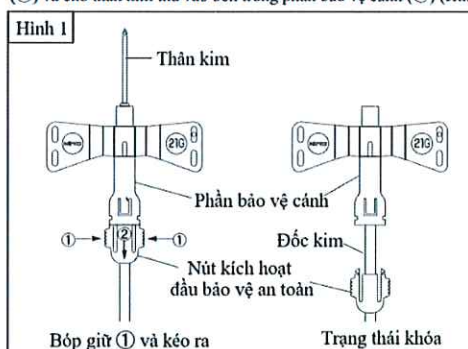

- 2) Khi thân kim khớp vào vị trí bên trong phần bảo vệ cánh, sẽ phát ra tiếng "tách" báo hiệu thân kim đã được bảo vệ. (Hình 2)

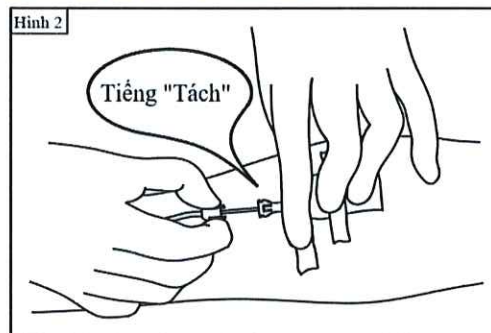

<Lưu ý khi sử dụng liên quan đến phương pháp sử dụng>

1. Hãy cẩn thận để không vô tình đâm kim lấy máu vào ngón tay hoặc các bộ phận khác của cơ thể.
2. Khi tháo nắp bảo vệ để gắn đầu nối Luer vào Holder, hãy tháo thẳng ra mà không để nắp bảo vệ chạm vào ống bọc cao su. [Nếu kim đâm vào mặt bên của ống bọc cao su, có thể gây rò rỉ máu.]
3. Khi tháo nắp cần chú ý tránh tiếp xúc với phần đầu kim. [Có nguy cơ đầu kim bị biến dạng, và trở nên khó đâm]

[Lưu ý khi sử dụng]

1. Lưu ý cơ bản quan trọng

- 1) Khi mở bao bì, lưu ý không để màng film bao bì vướng vào phần nắp trên sản phẩm. [Có nguy cơ gây cong kim do lực mở bao bì.]
- 2) Không sử dụng sản phẩm này kết hợp với ống lấy máu có đường kính ngoài phần nắp từ 17.5mm trở lên. Đặc biệt, trường hợp sử dụng ống lấy máu đường kính lớn của các công ty khác vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ của sản phẩm này để xác nhận có sử dụng được hay không. [Có nguy cơ nắp rơi ra khi rút ống lấy máu ra.]
- 3) Trong lúc sử dụng, cần kiểm tra thường xuyên tình trạng sản phẩm như hư hỏng, khớp nối bị lỏng, không khí xâm nhập vào, rò rỉ máu và tắc nghẽn, vv... hay không.
- 4) Khi kiểm tra thấy phần đầu kết nối của sản phẩm bị nứt, phải nhanh chóng thay sản phẩm mới.

- 5) Không sử dụng dây ở trạng thái gãy gập, bị kéo giãn.
- 6) Lưu ý không kéo, đè hoặc tác động lực quá mức lên phần nối giữa dây và đầu nối. [Có thể gây tuột, hư hỏng hoặc giãn dây]
- 7) Lưu ý không tạo lực quá mức lên phần thân kim. [Có nguy cơ cong, gãy đứt thân kim hoặc hư hỏng đốc kim.]
- 8) Khi lấy máu và khi sử dụng cơ chế đầu bảo vệ an toàn để phòng tránh tai nạn do kim dễ rút kim, cần cố định cánh ở mức phù hợp. [Có nguy cơ thân kim bị trượt và gây tổn thương thành mạch máu.]
- 9) Không giữ nút kích hoạt đầu bảo vệ an toàn khi đâm kim. [Có nguy cơ nút kích hoạt đầu bảo vệ an toàn bị mở khóa và không thể đâm kim được.]
- 10) Không để dung dịch như cồn, vv... dính vào phần xung quanh đốc kim. [Dung dịch có thể thấm thấu vào giữa phần bảo vệ cánh và đốc kim, gây hư hỏng đốc kim.]
- 11) Trường hợp sử dụng các dung dịch sát khuẩn bao gồm cả cồn cần chú ý tình trạng nút vô dầu kết nối và đốc kim. [Dung dịch làm nút vô dầu kết nối và đốc kim, gây rò rỉ máu, không khí xâm nhập, vv...]
- 12) Khi đang lấy máu, không mở khóa nút kích hoạt đầu bảo vệ an toàn. [Gây hư hỏng]
- 13) Khi mở khóa nút kích hoạt đầu bảo vệ an toàn và thu kim phải kéo theo chiều thẳng đứng, tránh kéo theo chiều ngang. [Nếu không kéo theo chiều thẳng đứng, ngay sau khi khóa để ngăn kim đâm sẽ tạo ra lực đè nén và có nguy cơ dẫn đến gãy kim.]
- 14) Trường hợp nhận thấy có bất thường như nút kích hoạt đầu bảo vệ an toàn khó mở khóa, hãy rút kim ra mà không sử dụng cơ chế ngăn ngừa sự cố kim đâm và nhanh chóng vứt bỏ kịp thời vào thùng chứa chất thải, cẩn thận để kim không làm bị thương bản tay hoặc ngón tay.
- 15) Sau khi sử dụng cơ chế ngăn ngừa sự cố kim đâm, không bẻ gấp phần giữa nút kích hoạt đầu bảo vệ an toàn và đốc kim. [Có nguy cơ gây ra sự cố kim đâm và rò rỉ]
- 16) Sau khi sử dụng cơ chế ngăn ngừa sự cố kim đâm, tuyệt đối không thực hiện thao tác mở khóa vì có nguy cơ kim sẽ bắn ra ngoài gây nguy hiểm.
- 17) Nếu phát hiện máu rỉ ra từ ống bọc cao su, hãy tháo kim và thay thế bằng sản phẩm mới. [Nếu đầu kim của kim dùng để đâm vào nút cao su đâm xuyên qua mặt bên của ống bọc cao su, ống bọc cao su sẽ không trở lại trạng thái bình thường và có nguy cơ rò rỉ máu.]
- 18) Khi tháo holder ra khỏi đầu kết nối, cần lưu ý nguy cơ luer adapter rơi ra khỏi holder.
- 19) Không lấy máu từ hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể hoặc từ tĩnh mạch trung tâm. [Do thay đổi áp suất, máu bên trong ống lấy máu có thể chảy ngược vào cơ thể bệnh nhân.]

2. Sự cố/tác dụng phụ

1) Các sự cố khác

- (1) Phần bảo vệ bị bung ra.
- (2) Kim bị cong.

[Phương pháp bảo quản và thời hạn sử dụng]

1. Phương pháp bảo quản

Bảo quản tại nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao.

2. Hạn sử dụng

Xem hạn sử dụng trên bao bì.

UNCONTROLLED COPY

Các ký hiệu được sử dụng để dán nhãn

STERILE EO

Tiệt khuẩn bằng etylen oxyt



Không được sử dụng khi bao gói đã bị hư hỏng



Không sử dụng lại



Tránh xa ánh nắng mặt trời



Giữ khô ráo

MADE IN VIETNAM

[Nhà sản xuất]

CÔNG TY TNHH NIPRO VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô I-8-3, Đường D8, Phường Tăng Nhơn Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

[Nhà phân phối]

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà Viettel Complex,
285 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

VIFUVN-PSVHOLDERR00 (Ngày tạo: 2025-08-20)