

KHÓA BA NGÃ

NIPRO STOPCOCK

khóa 3 ngã đầu nối luer lock
khóa 3 ngã đầu nối luer slip

Mục đích sử dụng:

Thiết bị này được sử dụng để mở, đóng hoặc chuyển hướng dòng chảy của chất lỏng ví dụ như dịch truyền y tế.

Cảnh báo:

1. Không để thuốc hoặc các chất lỏng khác bám vào các bộ phận kết nối.

[Các bộ phận kết nối có thể bị lỏng.]

2. Không xoay khóa quá mức cần thiết. Đặc biệt, không xoay khóa quá 180° khi sử dụng loại 1 bar.

[Làm như vậy có thể làm hỏng thiết bị.]

3. Khi tiêm bằng kim có gắn bộ nối kim, hãy cẩn thận để đầu kim không tiếp xúc hoặc làm hỏng khóa hoặc bề mặt bên trong của khóa ba ngã.

[Chức năng TẮT có thể không hoạt động do thay đổi hướng dòng chảy hoặc chất lỏng có thể rò rỉ khi thiết bị được kết nối với các thiết bị y tế khác.]

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi mở bao bì, kết nối đầu nối luer của NIPRO STOPCOCK với thiết bị cần thiết. Kết nối khóa chắc chắn để không bị rò rỉ. Đối với loại đầu nối luer lock vặn xoắn, hãy vặn chặt khóa nối. Kiểm tra hướng dòng chảy mở, được in trên NIPRO STOPCOCK, mở, đóng hoặc thay đổi hướng dòng chảy khi cần thiết.

D-TH-AK-STOPCOCK-00 (2022-12-20)