



# DENTAL NEEDLE

<Hướng dẫn sử dụng>

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ. Hướng dẫn sử dụng.


## Chỉ định

Kim nha khoa được nha sĩ sử dụng để gây tê nha khoa tại chỗ, ở nướu của bệnh nhân khi cần điều trị thủ thuật nha khoa gây đau.

## Chống chỉ định

- Không tái sử dụng

## Hình dạng và cấu trúc

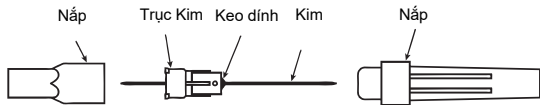

## Lợi ích lâm sàng

Bằng cách kết nối với ống tiêm nha khoa, thuốc gây tê có thể được tiêm vào nướu, hoạt động như một đường di chuyển cho các dây thần kinh ngoại biên, do đó làm giảm cơn đau của bệnh nhân khi trải qua điều trị nha khoa.

## Lưu ý

1. Kim có thể bị gãy nếu kim bị uốn cong nhiều lần trong quá trình sử dụng, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng.
2. Ngừng sử dụng thiết bị nếu xảy ra hư hỏng như đầu kim móc câu.
3. Kim có thể đâm thủng phần cao su của ống thuốc khi nó được kết nối với ống thuốc. Thực hiện tiêm thử nghiệm hoặc quy trình khác để kiểm tra tắc nghẽn kim.
4. Xử lý thiết bị cẩn thận để không vô tình dính vào mình.
5. Không tác dụng lực quá mạnh vào trục kim. Ngoài ra, không tác dụng lực xoay quá mức lên nắp kim khi kết nối trục kim. Kim hoặc trục kim có thể bị vỡ.
6. Khi tháo nắp và vỏ, hãy đảm bảo rằng chúng không tiếp xúc với đầu kim. Đầu kim có thể biến dạng và làm cho việc xuyên kim khó khăn hoặc chặn dòng chảy. Mở nắp theo trục thẳng.
7. Không cho phép thuốc dính vào các bộ phận kết nối. Có thể gây lỏng kết nối.
8. Không đẩy lại kim. Đẩy lại có thể dẫn đến dính kim. Ngoài ra, nếu nắp được đẩy lại ở góc không chính xác, nắp có thể bị kim đâm thủng.
9. Dây là một thiết bị nhựa tổng hợp sẽ bị hư hại ở nhiệt độ thấp. Xử lý cẩn thận trong môi trường nhiệt độ thấp. Nó có thể bị vỡ.
10. Việc sử dụng lại thiết bị có thể dẫn đến nhiễm trùng và nguy cơ lây nhiễm.
11. Vứt bỏ thiết bị trong thùng chứa nguy hiểm sinh học đã được phê duyệt theo quy trình của cơ sở.
12. Bất kỳ sự cố nào cũng phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.
13. Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng.
14. Nếu thiết bị tiếp xúc với các điều kiện bất thường (ví dụ: nhiệt độ và độ ẩm cao) hoặc nếu thiết bị vô tình mở trước khi sử dụng, không sử dụng thiết bị.

## Hướng dẫn sử dụng

1. Vặn nắp để phá vỡ giấy niêm phong, sau đó tháo nắp.
2. Vặn trục kim vào ống tiêm thuốc để cố định kim vào vị trí.
3. Tháo nắp kim còn lại và tiến hành sử dụng.

## Kết nối với các thiết bị khác

Thiết bị, tuân theo ISO 7885, kết nối với ống tiêm thuốc nha khoa bằng phần kết nối dạng vặn của trục kim.

## Ký hiệu trên nhãn

STERILE EO Tiệt trùng bằng ethylene oxide



Có chứa chất độc hại



**NIPRO CORPORATION**  
3-26, Senriokashinmachi, Settsu,  
Osaka, 566-8510, Nhật Bản



**NIPRO MEDICAL EUROPE**  
Blokhuistraat 42, 2800  
Mechelen, Bỉ

SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN



D-CE-GM-DNLMR-00N (2023-11-20)