



KIM TIÊM DƯỚI DA HYPODERMIC NEEDLE

<Hướng dẫn sử dụng>
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

[Chỉ định]

Thiết bị là thiết bị y tế chung, không chỉ định cho một đối tượng bệnh nhân hoặc bệnh lý cụ thể nào. Thiết bị chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế và/hoặc theo sự chỉ định, hướng dẫn của Bác sỹ.

[Mục đích sử dụng]

Thiết bị được sử dụng để hút dịch từ lọ và ống thuốc, đồng thời, để tiêm các dung dịch vào bên dưới bề mặt da.

[Chống chỉ định]


Không được tái sử dụng.

[Điều kiện bảo quản]

Không bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm quá thấp hoặc quá cao.

[Hình dạng và cấu trúc]

Thiết bị được tiệt trùng bằng khí ethylene oxide. Cấu tạo gồm: đốc kim, ống kim và nắp bảo vệ kim.

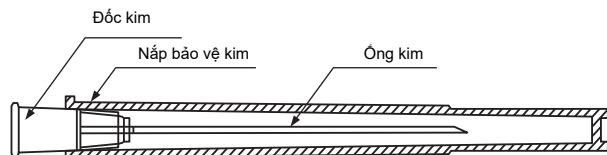

[Thận trọng]

- Cẩn thận khi thao tác với thiết bị để tránh vô ý bị kim đâm.
- Không tác dụng lực quá mạnh lên đốc kim. Khi kết nối thiết bị với bơm tiêm, không được vận quá mức lên đốc kim thông qua nắp bảo vệ kim. [Có thể làm gãy ống kim hoặc đốc kim.]
- Khi tháo nắp bảo vệ kim, chú ý không để đầu kim chạm vào nắp bảo vệ. [Nếu đầu kim chạm vào nắp bảo vệ, nắp bảo vệ có thể làm biến dạng đầu kim, gây khó khăn cho thao tác chọc kim.]
- Chú ý tránh để thiết bị tiếp xúc với thành của lọ/ống chứa thuốc, v.v. [Đầu kim có thể bị biến dạng, gây khó khăn cho việc chọc kim.]
- Không để thuốc hoặc máu dính vào bộ phận kết nối. [Các bộ phận kết nối có thể bị lỏng, v.v.]
- Không đẩy lại nắp bảo vệ kim sau khi đã tháo. [Việc đẩy lại nắp có thể dẫn đến nguy cơ bị kim đâm. Ngoài ra, nếu nắp bảo vệ kim được đẩy lại không đúng cách, hoặc bị lệch, đầu kim có thể xuyên thủng qua nắp bảo vệ.]
- Việc tái sử dụng thiết bị có thể dẫn đến nhiễm trùng do nhiễm bẩn.
- Không sử dụng thiết bị nếu bao bì bị hư hỏng.
- Trong quá trình sử dụng, cần chú ý đến mọi dấu hiệu hư hỏng của thiết bị, các mối nối bị lỏng, có không khí lọt vào, rò rỉ thuốc/dung dịch, tắc nghẽn, v.v.
- Thiết bị được làm từ vật liệu nhựa tổng hợp, có thể bị giảm chất lượng ở môi trường nhiệt độ thấp. Cần thao tác cẩn thận trong môi trường nhiệt độ thấp.

[Hướng dẫn sử dụng]

- Tháo bao bì và lấy thiết bị ra.
- Gắn chặt thiết bị vào bơm tiêm.
- Tháo nắp bảo vệ kim bằng cách kéo thẳng ra.

[Số lượng đóng gói]

Vui lòng tham khảo thông tin trên từng bao bì.

[Ký hiệu sử dụng trên nhãn sản phẩm]

STERILE EO

Tiệt trùng bằng khí ethylene oxide



Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng



Không gây sốt



Không được tái sử dụng



Ngày sản xuất



Hạn sử dụng



Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay

LOT

Số lô



Chủ sở hữu sản phẩm:
NIPRO CORPORATION
3-26, Senriokashinmachi, Settsu,
Osaka, 566-8510, Nhật Bản

Nhà sản xuất:
NIPRO (THAILAND) CORPORATION LIMITED
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thái Lan

Chủ sở hữu số lưu hành tại Việt Nam, Nhập khẩu, Phân phối:

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM
Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà Viettel Complex,
285 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hòa Hưng,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN

D-TH-NTC-PN-00C
DNTCPACKNEEDLEA (2024-02-02)